



## COMO ALIMENTAR AL BECERRO POR MEDIO DE UN TUBO ALIMENTADOR

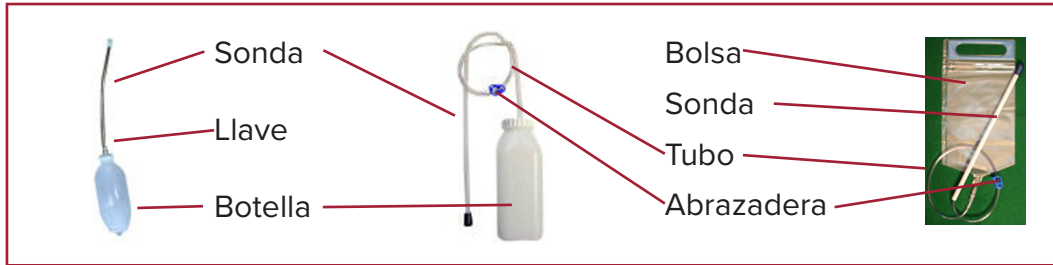

**Nota:** No todos los dispositivos alimentadores de becerros tienen tubos o abrazaderas como se muestra con el primer dispositivo alimentador. En este caso, el primer dispositivo tiene una llave que se puede utilizar para detener el flujo de fluidos.

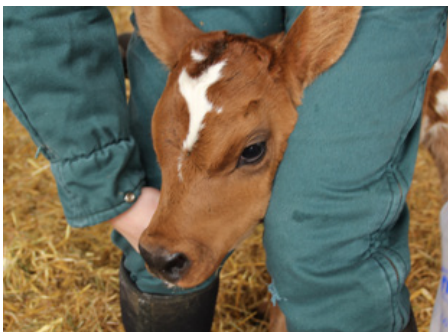

1. Llenar la bolsa o botella alimentadora de becerros con fluidos (calostro, leche, electrolitos, etc).
2. Si se utiliza una botella alimentadora, conecte la sonda a la botella (si se utiliza una bolsa de alimentación, la sonda ya estará conectada a la bolsa).
3. Asegúrese de que el tubo esté sujetado directamente debajo de la bolsa o botella para que no haya líquido en la sonda.
4. Restringir el becerro moviéndolo hacia atrás en una esquina y colocar su cabeza entre las piernas. Usted debe estar posicionado en la misma dirección del becerro.
5. Humedecer la punta de la sonda con fluido/liquido de manera que pueda deslizarse más fácil.
6. Insertar el dedo en la comisura de la boca del becerro para abrir su boca suavemente.
7. Introduzca suavemente la punta de la sonda en la boca del becerro y sobre la lengua.
8. Continué deslizando lentamente la sonda en el extremo izquierdo de la boca del becerro. Mantenga la botella o bolsa debajo de la cabeza del becerro para asegurarse que no salga líquido.
9. El becerro probablemente tendrá que luchar un poco cuando Usted esté introduciendo la sonda. Si el becerro tose o lucha ferozmente, extraiga/ saque la sonda y vuelva a intentarlo.
10. Toque la tráquea del becerro. Esto es similar a un tubo ligeramente firme en la parte inferior del cuello del becerro. Aquí es donde Usted NO DESEA que el tubo esté! El esófago del becerro estará directamente encima de la tráquea y hacia el lado izquierdo del becerro. Aquí es donde quiere el tubo.



**DETECTA. DEFIENDE. ENTREGA.**

## COMO ALIMENTAR AL BECERRO POR MEDIO DE UN TUBO ALIMENTADOR



11. Toque que la sonda se mueve en el cuello del becerro. Si Usted ha colocado la sonda correctamente en el esófago, se sentirá dos “tubos”; uno es la tráquea, el otro es la sonda en el esófago. Mover la sonda dentro y fuera para asegurarse de que pueda sentir la sonda moverse fuera de la tráquea.

Si Usted solo siente un tubo o Usted no puede sentir la sonda moverse hacia atrás y adelante, Usted está en la tráquea. Usted **DEBE** jalar la sonda lentamente hacia afuera y volver a intentar! Si Usted, por error, da los fluidos en la tráquea, estos líquidos irán directamente a los pulmones y matarán al becerro.



12. Una vez que esté seguro de que tiene la sonda en el esófago del becerro, elevar la cabeza y la bolsa o botella.
13. Abrir la abrazadera y dejar que el líquido drene/salga. **NO PRESIONE** la botella o bolsa!
14. Asegúrese de que el becerro sigue respirando mientras que Usted está dando los fluidos.
15. Una vez que la bolsa o botella está vacía, vuelva a cerrar la abrazadera.
16. Lentamente sacar el tubo y la sonda.



Electrolitos pueden ser alimentados por medio de tubo, con seguridad, a cualquier edad; sin embargo, re-emplazador de leche sólo debe ser alimentado si el becerro es menor de 7 días de edad.

Veterinarios de Armor están dispuestos a entrenar en-granja para asegurarse que la alimentación por tubo y sonda está correctamente hecha. Llame al 920.382.8580 para programar su entrenamiento en la granja o visite [www.armoranimalhealth.com/service-request](http://www.armoranimalhealth.com/service-request)

# DETECTA. DEFIENDE. ENTREGA.